

DESINFEKTION

WipeClean



# WipeClean Chlorine Disinfection

Engangsklude klar til brug. Beregnet til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr, og til generel desinfektion af overflader, der tåler klor.

## MED WIPECLEAN SPARER DU TID OG ØGER SIKKERHEDEN

WipeClean Chlorine Disinfection kludene er klar til brug direkte fra pakken og har en holdbarhed på 30 dage efter åbning. De er den optimale løsning til desinfektion af områder med high-level desinfektionskrav i sundheds- og plejesektoren. Dokumenteret effekt mod bl.a. Clostridium difficile og Murine norovirus.

Kludene er pakket i lufttætte forpackninger med nem lukning. De er fremstillet af polyester, og afgiver derfor så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

## GODT AT VIDE OM WIPECLEAN CHLORINE DISINFECTION

### ●●● High-Level

**Indholdsstoffer:** Sodium Hypochlorite >1,0 g/kg. Uden parfume og farvestoffer

**Holdbarhed:** Uåbnet 10 måneder. Efter åbning er kludene holdbare i 30 dage

Varenr.	Forpackningsstr.	Anvendelse
5241	Small - 10 wipes 20 x 30 cm	Til desinfektion af 1 m <sup>2</sup>
5242	Large - 5 wipes 40 x 30 cm	Til desinfektion af 2,5 m <sup>2</sup>

Biocidprodukt til professionelt brug.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne for anvendelse.



## EGENSKABER

Da kludene er både kryds- og z-foldet, kan de nemt tages ud af pakken enkeltvist, foldet og klar til brug.

## BRUGSVEJLEDNING

Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Bearbejd overfladen, så den holdes fugtig i henhold til kontakttid angivet på forpackningen.

Produktet er hverken beregnet til huddesinfektion eller slutsterilisering af medicinsk udstyr. Anvend handsker i henhold til EN 374.

Produktet er ikke velegnet til brug på stof, træ, naturgummi, malede overflader, papiroverflader og visse plastmaterialer. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret for brug.

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Hospitaler
- Plejehjem
- Tandlægeklinikker

plum

# Chlorine Disinfection

WipeClean Chlorine Disinfection er godkendt i henhold til en række EN-standarder og har dokumenteret effekt mod bl.a. Clostridium difficile og Murine norovirus. Giver minimum 1.000 ppm aktivt klor i hele holdbarhedsperioden. Vurderet af CEI til High-Level desinfektion.

Bakterier		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
MRSA	1 min	EN13727
	2 min	EN13697 EN16615
VRE	1 min	EN13727
	2 min	EN13697 EN16615
Enterococcus hirae	1 min	EN13727
	2 min	EN13697 EN16615
Escherichia coli	2 min	EN13697
Pseudomonas aeruginosa	1 min	EN13727
	2 min	EN13697 EN16615
Staphylococcus aureus	1 min	EN13727
	2 min	EN13697 EN16615

Virus		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
HEP B HEP C HIV Influenza A H1N1 Murine norovirus Adenovirus Poliovirus Coronavirus	1 min	EN14476

Sporer		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Bacillus subtilis	1 min	EN13704
Bacillus cereus Clostridium sporogenes	2 min	EN13704
Clostridium difficile	2 min	EN13704 EN16615

Svampe / Gær		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Aspergillus brasiliensis	15 min	EN13697
	2 min	EN13624
Candida albicans	2 min	EN13697 EN13624 EN16615

Tuberkulose / Mykobakterier		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min	EN14348



Produktet er CE-mærket.  
Sikkerhedsdatablad fremsendes efter ønske.